



Liv Des Special +50

Overflatedesinfeksjon

Overflatedesinfeksjon med tensid for å gi en rengjørende effekt, samt korrosjonsbeskyttelse for å unngå rust.

Den brukes i konsentrert form for effektivt å forebygge og forhindre spredning av mikrobiologiske infeksjoner (bakterier, sopp, virus) via overflater. Tilsetning av overflateaktivt middel øker alkoholens kontakt med overflaten.

Inneholder isopropanol (ca. 45%) - og etanol (ca. 10%). Svært godt egnet for dental- og medisinsk behandling, veterinærklinikker, laboratoriedrift eller lignende områder. Brukes hovedsakelig der spredning av mikrobiologisk infeksjon skal forhindres.

Bruksanvisning

Spray en rikelig mengde desinfeksjon på overflaten. Bearbeid overflaten med en ren tørreklut eller lofritt papir. Det er viktig at overflaten er fuktig under rengjøringen. Bruk hansker for å unngå uttørring av huden.

Dosering

Overflater: Rikelig produkt slik at hele overflaten dekkes og holdes fuktig gjennom eksponeringstiden.

Produktet oppfyller den europeiske standarden for desinfeksjonsmidler.

- Baktericid EN13727 5 min
- Baktericid EN 13697 2 min
- Gjærdrepene EN 13624 5 min
- Gjærdrepene EN 13697 2 min

Bruk biocider på en sikker måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Navn	Mengde	Antall i eske	Art. Nr.
Plastflaske	1 L	12 stk/krt	17220001



Produktegenskaper

- pH: ca. 8,0
- Med tensid
- IPA og etanolbasert
- Rustbeskyttelse

Produksjonsland: Sverige