

ANTIBAC OXIVIR EXCEL

Bredspektrigt väteperoxidbaserat ytdesinfektionsmedel för daglig rengöring och desinfektion inom hälso- och sjukvården.

Antibac Oxivir Excel är en bruksfärdig lösning för rengöring och desinfektion av ytor. Produkten är effektiv mot ett brett spektrum av mikroorganismer och den patenterade AHP-formulan ger en kortare kontakttid jämfört med vanlig väteperoxid. Kan användas på hårda, icke porösa ytor samt non-invasiv medicinteknisk utrustning. Bör ej användas på material som är känsliga för vatten och syra (t.ex. mässing, aluminium och galvaniserat stål). Undvik blandning med andra produkter.

Antibac Oxivir Excel är framtagen för daglig desinfektion inom hälso- och sjukvården samt dental och veterinärsektorn och är även lämplig till slutstädning.

Produkten är testad enligt Europeiska normer och är effektiv mot ett flertal sjukdomsframkallande mikroorganismer inklusive bakterier, jästsvamp samt virus så som HIV, Influensa, Vaccinia, Polio, Adeno och Murine norovirus.

- Effektiv mot bakterier, jästsvamp och virus.
- Snabb desinfektion med realistiska kontakttider
- Säker för både användare och ytor
- Verksamma ämnen bryts ner till vatten och syre
- Tensiderna i produkten är lätt nedbrytbara enligt Tvätt och Rengöringsmedelsförordningen (EC 648/2004)
- Kan användas på ytor som tål vatten och syra
- Ingen eftersköljning behövs
- CE-märkt och kan användas på non-invasiv medicinteknisk utrustning

Fullständig virucid effekt och god materialkompatibilitet.

Bruksanvisning Foam

1. Handskar godkända enligt EN 374 bör användas.
2. Avlägsna stora mängder organiskt material.
3. Spraya direkt på ytan och bearbeta den.
4. Säkerställ att ytan förblir fuktad under hela kontakttiden (se tabell).
5. Låt ytan lufttorka.



Bruksanvisning Wipe

1. Handskar godkända enligt EN 374 bör användas.
2. Avlägsna stora mängder organiskt material.
3. Öppna förpackningen, dra ut en duk och stäng locket.
4. Bearbeta ytan.
5. Säkerställ att ytan förblir fuktad under hela kontakttiden (se tabell).
6. Tag en ny duk när den inte längre fuktar ytan, om duken är synbart smutsig eller när en ny patientnära yta ska rengöras och desinficeras. En servett är avsedd för ca 0,5 m².

Microorganism	Efficacy test	Contact time (dirty conditions)
Bactericidal effect	EN13727 EN16615	30 sec 1 min
Yeasticidal effect	EN13624 EN16615	5 min 1 min
Virucidal effect	EN14476	30 sec



ARTIKELÖVERSIKT

	Benämning	Artikelnummer	Transportförp.	EAN-kod
	Oxivir Excel Foam 750 ml spray	603057	6	7054956030577
	Oxivir Excel Wipe 100 st Duk av polypropylene, 25 g/m ² , 20 x 30 cm	603055	12	7054956030553

Positionering	Bästa valet för daglig desinfektion, med full virucidal effekt.
Effektiv mot	Bakterier, jästsvamp och virus.
Målgrupp	Hälsa, -och sjukvård, tandvård, veterinär
Användningsområde	Daglig rengöring och desinfektion. Alla tagytor och non-invasiv medicinteknisk utrustning. Även lämplig för slutstädning.
CE märkning	Ja
Verksamma ämnen	3,6 g/kg väteperoxid (CAS nr: 7722-84-1)
Använd handskar (enligt EN 374)	Ja
Hållbarhet oöppnad förpackning	24 mån (flytande och wipe)
Hållbarhet öppnad förpackning	Till utgångsdatum tryckt på flaskan (flytande) 28 dagar (wipe)

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.