



Kiilto Pro Easydes Spray

750 ml

Desinfiserende rengjøringsmiddel



Et bruksklart alkoholbasert desinfeksjonsmiddel som også har rengjørende egenskaper. Egnet for alle alkoholbestandige materialer.

Bruksområde

Easydes kan brukes på alle alkoholbestandige materialer: kontaktflater, utstyr (inkludert telefon- og datatastaturer) og instrumenter. Det kan også brukes til daglig desinfisering av overflater og utstyr i næringsmiddelindustrien og i storhusholdning.

Produktegenskaper

Et etanolbasert, kvaternærfritt desinfeksjonsmiddel som inneholder ingredienser med rengjørende effekt. Produktet gir en rask mikrobicid effekt og destruerer effektivt bakterier, virus og sopp. Den mikrobicide effekten er verifisert gjennom EN-standardtester: EN 13727 (bakterier), EN 13697 (bakterier, sopp, gjærsopp), EN 13624 (gjærsopp), EN 14476 (adeno- og norovirus), EN 16615 (overflatedesinfisering ved avtørking). Desinfiserende effekt og godt rengjøringsresultat oppnås enkelt selv på synlig tilsmussede overflater. Easydes fjerner effektivt smuss og fett.

Bruksanvisning

Spray desinfeksjonsmiddelet direkte på den urene overflaten eller på en mikrofiberklut eller et engangspapir. Virketid 1 minutt. Hold flaten fuktig under hele virketiden. Gni over flaten. Forvask er ikke nødvendig. For å unngå belegg på overflaten kan den avtørkes med en ren, lett fuktig klut. Flater som kommer i kontakt med næringsmidler bør avskylles med rent vann.

Merk

Må ikke brukes på varme overflater.

Bruk biocider på forsvarlig måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Innhold

Aktive stoffer

Etanol	62,3 p-%
2-propanol	5 - <15 %

pH konsentrat

7.0

Oppbevaring

Oppbevares i romtemperatur. Holdbarhet 3 år fra produksjonsdato. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Utseende og lukt

Klar væske, etanol

Produksjonsland

FINLAND

**Bruker- og
miljøsikkerhet**

Brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. VED KONTAKT MED ØYNENE: skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle

Innhold/holder kastes i henhold til lokale/regionale forskrifter.

Emballasjen er produsert av miljøvennlig og fullstendig resirkulerbar PE-HD-plast og kan forbrennes. Produktet er biologisk nedbrytbart.

Emballasjematerialer

PE-HD plast

Forpakningsstørrelse / Artikkel nr.	Salgsenhet	Artikkel nr.	GTIN	GTIN (salgsenhet)
	6 x 750 ml	8183	6417964081831	6417964482454



Tilleggsinformasjon

Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside www.kiilto.no, eller send en epost til vår kundeservice post.no@kiilto.com.